

JOI PRO KIT KASUTUSJUHEND

Määrake kaasasoleva toonikaardiga oma hammaste toon ja tehke hammastest pilti enne ja pärast protseduuri. Peske oma hambad enne protseduuri hambapasta ja hambaharjaga.

VALGENDUSLAMBİ ETTEVALMISTAMINE

Laadige komplektis olev LED-UV tuli kaasas oleva laadimiskaabli abil. Sisselülitamiseks hoidke 3 sek all lambi ülemisel poolel olevat "Start" märgistusega nuppu.

VALGENDUSGEELI LISAMINE

Eemaldage valgendustuubilt kork ja katke valgenduslambi küljes olevate hambajäljendite alumine ja ülemine väline pool õhukese valgendusgeeli kihiga.

PROTSEDUUR

Asetage hambajäljendid suhu nii, et geel oleks kontaktis hammastega. Lülitage valgenduslamp lambi peal oleva ülemise nupu kaudu sisse, hoides nuppu all 3 sekundit.

Peale protseduuri

NB! 12 tundi peale valgendamist hoiduge tumedast teest, kohvist, suitsetamisest, punasest veinist ja teistest toiduainetest, mis võivad pärssida valgendus tulemusi!

Vastunaidustused:

Kui olete lapseootel. Esineb igemehaigusi või teisi hammastega seonduvaid probleeme. Samuti kui kannate hambaklambreid. Vältige silma sattumist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sobib kasutamiseks al 16 eluaastast. Ärge tehke kuuri üle 3 korra kuus.

Valgendusgeeli koostisosad:

Glycerin , Propylene Glycol , Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Titanium Dioxide, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Sodium Saccharin, Sodium Carbonate Peroxide

Easy as that!

OÜ ZLIMLINE GRUPP
Aadress: Pikk 44, Tallinn, 10133
Tel: +372 51977649
info@joi.ee
WWW.JOI.EE